


STANDARD Q COVID-19 Agテスト 取扱説明書




体外診断用医薬品 製造販売承認番号 30300EZ00067000
検査を実施する前によくお読みください。

[製品構成] 10テスト入り

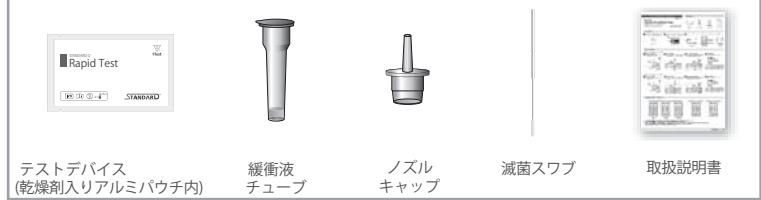


[準備]

- 1 本書をよくお読みください。
- 2 アルミパウチに記載されている有効期限をご確認ください。期限切れの場合使用しないでください。
- 3 アルミパウチ内のテストデバイスと乾燥剤を確認してください。

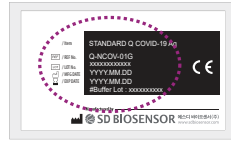

<アルミパウチ>

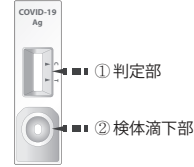

<テストデバイス>




黄色: 有効
緑色: 無効

<乾燥剤>

[使用方法]


鼻咽頭ぬぐい液を滅菌スワブを使用して採取します

- 1 スワブを鼻孔から下図の咽頭後壁まで挿入します。
- 2 咽頭後壁表面にスワブを5秒間当て粘膜炎を採取します。

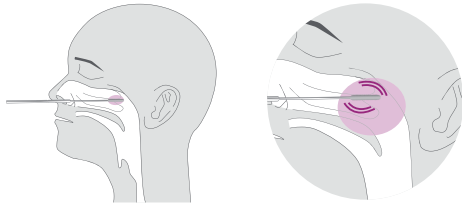


鼻腔ぬぐい液を滅菌スワブを使用して採取します


- 1 スワブを鼻腔に沿って2cm程度挿入します。
- 2 5回程度回転させ検体を採取します。

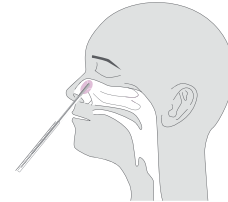

- 4 緩衝液チューブの側面を押しながらかスワブを5回まわします。
- 5 緩衝液チューブの側面を押し液体をスワブから絞りだすように引き抜きます。
- 6 緩衝液チューブにノズルキャップを確実に取り付けます。

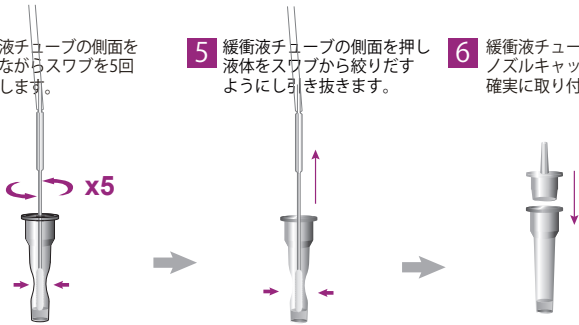

- 7 テストデバイスの検体滴下部に3滴滴下します。
- 8 15~30分の間に結果を読み取ります。

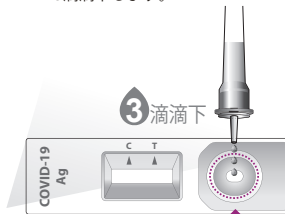


結果読み取り
15-30分の間
無効
30分以降

15-30 mins

誤判定の恐れがあります。
30分以降の結果は無効です。

注意

[検査結果の判定]

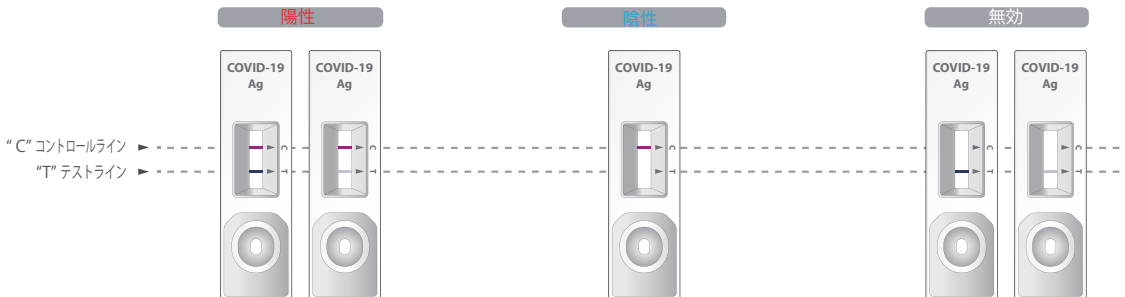

- ・抗原検査は発症後9日目以内をめどに実施してください。
- ・検査結果を診断に使用しないでください。

注意

製造元

SD BIOSENSOR

C-4&5Floor, 16, Deogyong-daero 1556beon-gil,
Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16690,
REPUBLIC OF KOREA
Tel +82-31-300-0400 | Fax +82-31-300-0499

輸入販売元

株式会社 **マルコム**
〒151-0071
東京都渋谷区本町4-15-10
e-mail: mdinfo@malcom.co.jp
URL: http://www.malcom.co.jp

製品に関するお問い合わせ先
マルコム コールセンター

0120-901-656

9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)
電話番号をよくお確かめの上、おかけ頂きますようお願いいたします。